

DIA

Istruzioni per l'uso



Dental Impression Alginate

Alginate non polveroso (dust free) per impronte

Descrizione / Impiego

Alginate con tempo di presa rapido ed elevata stabilità dimensionale per impronte di modelli diagnostici, arcate edentule, protesi rimovibili, apparecchi ortodontici, impronte preliminari, antagonisti e portaimpronta individuali.

Avvertenze

Non utilizzare verso pazienti con accertata o sospetta sensibilità agli alginati poiché può essere causa di reazioni allergiche. Non ingerire, evitare il contatto con gli occhi.

Modo d'uso

Trasferire il contenuto della busta in un contenitore a tenuta ermetica. Agitare il contenitore per uniformare il volume del prodotto. Prelevare con il misurino dosatore e livellare con la spatola senza comprimere l'alginate. Versare in una tazza flessibile e aggiungere una dose di acqua per ogni misurino di alginate. Miscelare con cura e attenersi ai tempi indicati in tabella.

Disinfezione

Dopo detersione, l'impronta può essere trattata con disinfettanti specifici per alginati. Osservare le indicazioni fornite dal produttore.

Preparazione dei modelli

Le impronte possono essere colate immediatamente dopo la disinfezione e non subiscono alterazioni se conservate correttamente in sacchetto sigillato. Si raccomanda di utilizzare gessi specifici per uso dentale.

Conservazione

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura di 5-27°C (41-80°F). I materiali sono garantiti fino alla data di scadenza se conservati correttamente nei loro imballi chiusi. Il lotto di produzione e la data di scadenza sono indicati sulle confezioni.

Dati Tecnici	DIA Dental Impression Alginate - fast setting
Rapporto di miscelazione	10 g. polvere / 17 ml acqua
Tempo di miscelazione (23°C)	30 sec.
Tempo di lavorazione / Total Working Time (ISO 1563)	1 min. 30 sec. / 2 min.
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	1 min.
Setting time (tempo di indurimento)	2 min. 30 sec.

Limitazione della responsabilità: Le indicazioni relative ai prodotti TRAYART, sia in forma orale che scritta, si basano sulla conoscenza ed esperienza acquisita nel campo odontoiatrico. Gli utilizzatori professionisti sono comunque tenuti a seguire le indicazioni per l'uso e verificare l'idoneità del prodotto secondo il tipo di applicazione. L'utilizzatore professionista si assume tutte le responsabilità per i rischi derivanti da un uso non corretto dei prodotti TRAYART. Un'eventuale difettosità dei prodotti limita la responsabilità del fabbricante al valore dei prodotti utilizzati dal professionista.

TRAYART

TRAYART srl
Via Paiette, 13/Q - 35040 Castelbaldo (PD) Italy
Tel. +39 0425 546515 www.trayart.it - info@trayart.it

SOLO PER USO ODONTOIATRICO